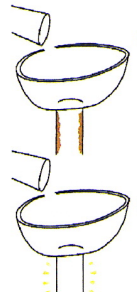
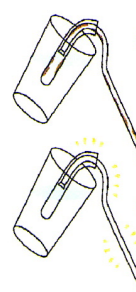
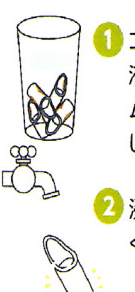


## 診療室の環境改善のご提案

スピットンからの臭いが患者さんを不快にさせていませんか？  
スピットンや配管内は血液・唾液等の汚れで細菌の温床（バイオフィルム）地帯です。  
バイオフィルムは悪臭、及びユニット配管内のトラブルの原因になります。  
患者さんに快適な診療室の環境を提供するため、悪臭、及びユニット配管内のトラブルの原因菌（バイオフィルム）を根こそぎ除去するスピットン・バキューム用除菌洗浄剤「グライムハンター」の導入を、ご提案させていただきます。

既にご導入の歯科医院様から（快適な治療環境が提供出来ています）と喜びのお声を頂いています。

### 【スピットン・バキューム洗浄のご提案】

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. スピットン・バキューム用除菌洗浄剤「グライムハンター」を50倍に希釈する。</p> <p>2. 洗浄方法</p> | <p><b>スピットン・排水パイプ</b></p>  <p>① 診療終了後、スピットンボウルと排水パイプに実用液※1を200～500mL程度流し、翌朝まで放置してください。</p> <p>② 翌朝、診療開始前に水を200～500mL程度流してください。</p> | <p><b>バキューム・排唾管</b></p>  <p>① 診療終了後、バキュームまたは排唾管に実用液※1を200～500mL程度吸引させ、翌朝まで放置してください。</p> <p>② 翌朝、診療開始前に水を200～500mL程度吸引させてください。</p> | <p><b>バキュームチップ</b></p>  <p>① コップなどの容器に実用液※1を適量とり、バキュームチップを30分以上浸漬してください。</p> <p>② 浸漬後、水でよくすすいでください。</p> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※1 実用液：グライムハンター50倍希釈液

### 【特長】

- 従来の洗浄剤では除去が難しい悪臭及び配管内のトラブルの原因菌（バイオフィルム）を効果的に除去します。
- スピットン・バキューム部材（樹脂、ゴム、金属）に対する劣化影響がなく安心です。

★ バイオフィルムの除去効果に関する特許取得（第5466782号）

◎毎日の診療後に『スピットンやバキュームを洗浄』していただき、患者さんに快適な診療環境を提供して頂ければと考えます。



有限会社デンタル・ウェーブ  
〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-4-22  
TEL 06-4802-6617 FAX 06-4802-6618  
URL <http://www.dental-wave.co.jp>