

# マウスガードポリッシャー

(一般医療機器 歯科用研磨器材 製造販売届出番号 27B3X00091000050)

【用途】 ナイトガード、スポーツマウスガードの形態修正及び研磨（艶出し）。

## 【特長】

- ① ナイトガード、スポーツマウスガードのシート辺縁等を軟らかいタッチで形態修正でき、シリコンポイントのようにシートに対する食い込みも無く簡単に研磨作業（艶出し）が行えます。
- ② シート研磨面の毛羽立ちが起こりにくいです。

※Q&Aを裏面に記載していますので参考にしてください。

## 【注意事項】

- ① 本品は水分に触れると原材料（圧縮して硬化させている）がふやけて膨張する為、使用出来なくなります。  
※ 使用・保管の際には、水分（消毒用アルコール等を含む）を避けるようご注意ください。
- ② 焼付き防止の為、5,000 ~ 6,000rpm程度でご使用下さい。



寸法（作業部）： 15mm × 25mm  
最高回転数： 6,000rpm  
入数： 形態修正用・仕上げ用 各1本入り  
医院価格： 3,800円（税抜）

## 【 Q & A 】

Q 1. 万が一、焼きついて色が付いた場合はどうしたら良いですか？

A. 再度軽く研磨を行うことで、修正できます。

Q 2. どれくらい使用できますか？

A. 研磨状況により、消耗量が違うために一概に使用可能量は算出できませんが、長期間使用可能です。

特に緑色の仕上げ用（艶出し）は消耗量が少ない為、長期間使用できます。

Q 3. ホワイトニングトレー（カスタムトレー）にも使用できますか？

A. ホワイトニングトレー（カスタムトレー）は、厚みが薄く辺縁が柔らかい為に、辺縁処理ができません。

★ ホワイトニングトレーの辺縁処理方法

ハサミやカッターナイフの処理だけで、十分に対応できます。